

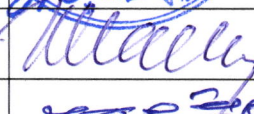
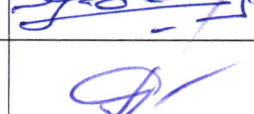
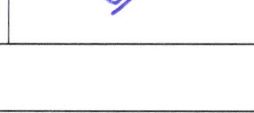
**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
PRIVIND UTILIZAREA
INSTALAȚIILOR BACTERICIDE
ULTRAVIOLETE**

CHIȘINĂU 2025

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.

Nr. crt.	Elemente privind responsabil/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Aprobat	Manea Diana	Director IMSP IMU	29.01.2025	
1.2.	Verificat	Maxim Igor	Vicedirector medical	28.01.2025	
1.3.	Verificat	Vovc Liviu	Șef secție Managementul Calității serviciilor medicale	27.01.2025	
1.4.	Elaborat	Pinteac Olga	Asistentă medicală șefă	23.01.2025	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale.

Nr. crt.	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
2.1.	Ediția 1			
2.2.	Revizia 1			

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2					
3.1.	Aplicare	1	Președintele Consiliului Calității	Vicedirector medical	Maxim Igor		
3.2.	Aplicare	2	Serviciul Managementul Calității serviciilor medicale	Șef	Vovc Liviu		
3.3.	Aplicare	3	Administrația	Asistentă medicală șefă	Pinteac Olga		
3.4.	Aplicare	4	Serviciul audit inter	Șef	Rusu Ion		
3.5.	Aplicare	5	Farmacie	Diriginte	Bargan Viorica		

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

3.6.	Aplicare	6	UPU	Asistentă medical superioară	Talmaci Natalia		
3.7.	Aplicare	7	Secția Reanimare	Asistentă medical superioară	Panfil Ana		
3.8	Aplicare	8	Secția Anesteziologie și Terapie Intensivă	Asistentă medical superioară	Vozian Svetlana		
3.9	Aplicare	9	Secția Hemodializă	Asistentă medical superioară	Stoicov Elena		
3.10	Aplicare	10	Secția Chirurgie nr.1	Asistentă medical superioară	Cercel Mariana		
3.11	Aplicare	11	Secția Chirurgie nr.2	Asistentă medical superioară	Tepleacova Elena		
3.12	Aplicare	12	Secția Chirurgie nr.3	Asistentă medical superioară	Savcenko Elena		
3.13	Aplicare	13	Secția Chirurgie Traume Asociate	Asistentă medical superioară	Gusac Eleonora		
3.14	Aplicare	14	Secția Chirurgie Toracică	Asistentă medical superioară	Leca Nelea		
3.15	Aplicare	15	Secția Chirurgie Vasculară	Asistentă medical superioară	Gorgos Tatiana		
3.16	Aplicare	16	Secția Chirurgie OMF	Asistentă medical superioară	Mura Oxana		
3.17	Aplicare	17	Secția Urologie	Asistentă medical superioară	Șportac Lăcrimioara		
3.18	Aplicare	18	Secția Ginicologie	Asistentă medical superioară	Buruian Nina		
3.19	Aplicare	19	Blocul de Operații	Asistentă medical superioară	Gaidarji Feodora		
3.20	Aplicare	20	Secția Endoscopie	Asistentă medical superioară	Arpentin Ana		
3.21	Aplicare	21	Secția Morfopatologie	Asistentă medical superioară	Codreanu Aliona		
3.22	Aplicare	22	Secția Ortopedie și Traumatologie nr.1	Asistentă medical superioară	Dulce Ana		
3.23	Aplicare	23	Secția Ortopedie și Traumatologie nr.2	Asistentă medical superioară	Tofan Lilia		
3.24	Aplicare	24	Secția Ortopedie nr.1	Asistentă medical superioară	Gonța Lilia		
3.25	Aplicare	25	Secția Ortopedie nr.2	Asistentă medical superioară	Lupei Mariana		

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

3.26	Aplicare	26	Secția Ortopedie și Traumatologie nr.3	Asistentă medical superioară	Rotaru Elena		
3.27	Aplicare	27	Secția Microchirurgie	Asistentă medical superioară	Tuchila Valentina		
3.28	Aplicare	28	Secția Neurochirurgie	Asistentă medical superioară	Cioran Eleonora		
3.29	Aplicare	29	Secția Oftalmologie	Asistentă medical superioară	Botnaru Olga		
3.30	Aplicare	30	Secția Chirurgie Spinală	Asistentă medical superioară	Chircu Oxana		
3.31	Aplicare	31	Secția Neurologie	Asistentă medical superioară	Vasilașco Svetlana		
3.32	Aplicare	32	Secția Neurologie BCV	Asistentă medical superioară	Pleşca Natalia		
3.33	Aplicare	33	Laboratorul medicină intervențională	Asistentă medical superioară	Batarovschi Irina		
3.34	Aplicare	34	Secția Epileptologie	Asistentă medical superioară	Boțan Natalia		
3.35	Aplicare	35	Secția Boli Interne	Asistentă medical superioară	Darsalia Marina		
3.36	Aplicare	36	Secția Terapie Intensivă “Stroke”	Asistentă medical superioară	Josan Alexandra		
3.37	Aplicare	37	Secția Reabilitare Medicală și Medicină fizică	Asistentă medical superioară	Merițoi Nadejda		
3.38	Aplicare	38	Secția Radioimagnostic și Diagnostic de Laborator	Asistentă medical superioară	Calancea Aurelia		
3.39	Aplicare	39	Laboratorul Clinic Diagnostic	Asistentă medical superioară	Tocarciuc Olga		
3.40	Aplicare	40	Laboratorul Microbiologic	Asistentă medical superioară	Pînzari Gabriela		
3.41	Aplicare	41	Anestezie și Terapie Intensivă 2	Asistentă medical superioară	Molla Vera		
3.42	Aplicare	42	Secția Neurofiziologie	Asistentă medical superioară	Socol Francesca		

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

4. Scopul procedurii.

Reducerea numărului de microorganisme și prevenirea bolilor infecțioase, dezinfectarea aerului din încăperile instituției întru menținerea condițiilor sanitaro-igienice și antiepidemice și pentru desfășurarea în siguranță a actului medical.

5. Domeniul de aplicare a procedurii.

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către asistentele medicale de operație, asistentele medicale de proceduri, asistentele medicale în tură și asistentele medicale din alte subdiviziuni, care sunt nemijlocit implicate în procesul de curățenie și dezinfecție în instituție.

6. Documente de referință aplicabile procedurii operaționale:

- SR EN ISO 9001:2008, actualizat în 2015 - Sistem de management al calității, Principii

Fundamentale și cerințe de bază;

- SR ISO IWA 1:2009 - Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru îmbunătățiri de proces în organizațiile de servicii de sănătate;

- SR CEN/TS 15224:2001 - Servicii de sănătate. Sisteme de management al calității" Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001.

6.1 Reglementări internaționale:

Regulamentul UE nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană.

6.2 Reglementări naționale:

- Legea Nr. 227 din 31-07-2024 pentru modificarea Legii nr. 552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate.
- Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005;
- Legea Republicii Moldova nr. 10 din 03.02.2009, privind supravegherea de stat sănătății publice;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr.139 din 03.03.2010 „Privind asigurarea calității serviciilor medicale în instituțiile medico-sanitare”;

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

- Ordinul 672 din 09.08.2024 Cu privire la aprobarea Ghidului pentru prevenirea și controlul infecțiilor în instituția medico-sanitară spitalicească;
- Legea Republicii Moldova nr. 209 din 29.07.2016 „Privind deșeurile”;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 248 din 10.04.2013 pentru aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în RM pentru anii 2013-2027;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 696 din 11.01.2018 „Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală”;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr.652 din 06.06.2013„Cu privire la Implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în RM pentru anii 2013-2027”;
- Ordinul MSMPs nr. 62 din 22.01.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor medicale”;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr.765 din 30.09.2015„Cu privire la aprobarea Ghidului practic ”Siguranța injectiilor”
- Standarde de îngrijiri nursing,

6.3 Reglementări secundare

- Ordinul Ministerul Sănătății nr. 470 din 26.05.2023 „Cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță ai activității instituției medico-sanitare publice”;
- Ordinul Ministerul Sănătății nr. 532 din 13.06.2023 „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 al ordinului nr. 470/2023”.

6.4 Reglementări interne

- Regulamentul de funcționare al IMSP Institutul de Medicină Urgentă;
- Organigrama IMSP IMU;
 - Regulamentul intern ale structurii organizatorice;
 - Fișele de post;
 - Plan de măsuri privind combaterea și profilaxia infecțiilor asociate asistenței medicale în IMSP IMU.

7.Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedură.

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
7.1.1.	Curățenie	Metodă de decontaminare a suprafețelor, obiectelor prin care se îndepărtează odată cu praful și substanțele organice și o parte din microorganisme, utilizând detergenți, produse de întreținere a curățenie.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

7.1.2.	Dezinfecție	Metodă de distrugere a microorganismelor patogene de pe suprafețe, obiecte, cu excepția sporilor bacterieni.
7.1.3.	Dezinfecție prin mijloace fizice	Totalitatea mijloacelor fizice (mecanice, caldura, radiații UV sau ionizante de distrugere a microorganismelor patogene de pe suprafețe, obiecte cu excepția sporilor bacterieni.
7.1.4.	Lampa bactericidă UV	Este utilizată ca metoda fizică de dezinfecție a aerului și suprafețelor netede din boxe de laborator, săli de tratament, cabinet de consultații, săli de așteptare, adică în spații unde încărcatura microbiană este ridicată, metoda completează curățenia și dezinfecția chimică.
7.1.5	Instalație ultravioletă bactericidă	Dispozitiv electro-termic, constituit din una sau mai multe lămpi bactericide și cu accesoriu reflector.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
7.2.1.	IMSP SCTO	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
7.2.2.	IN	Infecții nosocomiale
7.2.3.	MS	Ministerul Sănătății
7.2.4.	CC	Consiliul Calității
7.2.4	UV	Radiații ultraviolete
7.2.5	E	Elaborare
7.2.6	V	Verificare
7.2.7	A	Aprobare
7.2.8	D	Distribuire

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

7.2.9	Ap	Aplicare
7.10	Ah	Arhivare
7.11	EPP	Echipament de protecție personală
7.12	IAAM	Infecție asociată a asistenței medicale
7.13	UV	Radiații ultraviolete

8.Descrierea procedurii

8.1. Generalități

Dezinfecția aerului și a suprafețelor din cadrul încăperilor instituțiilor medicale se realizează, prin intermediul lămpilor cu raze ultraviolete, ceea ce reprezintă o măsură antiepidemică, menite se reducă nivelul de contaminare bacteriană și să asigure prevenirea complicațiilor infecțioase intraspitalicești. Acest lucru este efectuat prin intermediul instalațiilor ultraviolete bactericide care sunt amplasate, obligator, în încăperilor cu risc epidemiologic sporit:

- sălile de operație,
- secțiile de reanimare, încăperile de sterilizare, manipulări, sălile de proceduri și pansamente etc.

Pentru a realiza o curățenie și dezinfecție generală în sala de proceduri la nivelul cerințelor spitalul utilizează:

- personal instruit;
- analiză microbiologică clasică;
- evaluarea vizuală a procesului de curățenie și dezinfecție;

Dezinfecție prin utilizarea lămpii bactericide UV completează curățenia și dezinfecția chimică.

8.2 Documente utilizate

- Registrul de evidență a efectuării curățeniei generale;
- Procese verbale ale vizitelor serviciului epidemiologic în secții și subdiviziuni;
- Ancheta epidemiologică;
- Registrul de evidență a utilizării lămpilor bactericide pentru dezinfecție;
- Registru de înregistrare a lavajelor;
- Procedura operațională cadru privind elaborarea procedurilor.

8.2.1 Lista și proveniența documentelor

- Registre utilizate conform ordinului MS RM nr.630 din 08.08.2016;
- Ancheta epidemiologică conform ordinului MS nr.828 din 31.10.2011;
- Procese verbale și instrucțiuni interne;

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor

Toate documentele sun anexate la procedură.

8.2.3 Circuitul documentelor

Secretarul consiliului calității→Epidemiologul informare→Laborantul informare.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

Secretarul consiliului calității→Șeful secției informare→as. superioară informare→ as. de operație, as. de proceduri aplicare→ as. medical aplicare→ soră economă informare→ infirmieri informare .

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale:

- Lămpi bactericide UV

8.3.2 Resurse umane

- asistenta de operație
- asistentele de proceduri;
- asistentele medicale în tură;
- asistentele medicale în serviciile unde sunt instalate lămpi bactericide UV;

8.3.3 Resurse financiare

Anual sunt calculate și prevăzute în planul de achiziții al instituției resursele necesare pentru procurarea lămpilor bactericide UV.

8.3.4 Resurse nemateriale

Instruirea personalului medical privind respectarea procedurii și aplicarea corectă a instrucțiunilor privind utilizarea lămpilor bactericide UV.

8.4 Modul de lucru

Dezinfectarea ultravioletă bactericidă a aerului în încăperi reprezintă distrugerea microorganismelor din aerul încăperilor sau a celor de pe suprafețe prin intermediul iradierii electromagnetice spectrului ultraviolet.

Instalația ultravioletă bactericidă este un dispozitiv electro-tehnic, constituit din una sau mai multe lămpi bactericide și cu accesoriu reflector.

Instalațiile bactericide sunt de trei tipuri:

- de tip de deschis (tavan sau perete, staționar sau mobile);
- de tip închis (recirculatoare);
- ecranate (deschise de sus și cu jaluzele);
- combinate (o combinație de lămpi UVB deschise și ecranate).

La instalațiile bactericide de tip combinat deschis, fluxul iradierii cuprinde o zonă mai largă. Aceste tipuri de instalații sunt compuse din două lămpi bactericide ultraviolete, care sunt divizate printr-un ecran ce asigură ca fluxul unei lămpi să fie îndreptat în partea de sus a încăperii, iar cealaltă în partea de jos. Instalațiile bactericide de tip combinat deschis sunt destinate dezinfecției încăperilor doar în lipsa persoanelor. La instalațiile de tip închis (recirculator) fluxul bactericid al lămpii din interiorul carcasului nu iradiază în afară. Aceste tipuri de instalații necesită a fi amplasate în locul curenților de aer din încăpere, la înălțimea de 1,5-2 metri de la podea. Recirculatoarele se pot utiliza neîntrerupt chiar și în prezența persoanelor.

8.4.1 Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Utilizarea lămpii bactericide în tipul curățeniei și **dezinfecției zilnice (30 min)** și **dezinfecției la curățenia generală (1 oră)** și de câte ori este necesar. Lămpile de UV se prelucrează cu soluție de 70% alcool etilic sau izopropilic. Fregvența specifică de curățare a lămpilor UVB depinde de condițiile locale. Fregvența este stabilită pentru diferite spații și depinde de tipul de ventilație

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

mecanică, naturală și de calitatea filtrării aerului de alimentare, precum și de cantitatea de praf din mediu.

8.4.2 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

- asistenta de proceduri sau asistenta medicală conectează lampa la o sursă de energie;
 - încăperea unde se aplică trebuie curățată și dezinfectată în prealabil;
 - lampa se lasă să acționeze conform timpului de curățenie și dezinfecție, după care se consemnează în registru de funcționare a lămpii UV pentru fiecare lampă aparte (data, persoana responsabilă, ora începerii cuarțării ora încetării cuarțării);
- Dezinfecția ultravioletă a aerului se efectuează, în mod obligator, în sălile de operații,

saloanele post-operatorii, secția de reanimare, încăperile de sterilizare, manipulări, sălile de proceduri și pansamente. Se va efectua dezinfecția cu lampa bactericidă în saloane fără prezența pacienților.

- În sălile de operații cuarțarea aerului prin intermediul instalațiilor ultraviolete de tip deschis se efectuează timp de 30 minute înainte și după intervenția chirurgicală.

- Dezinfecția aerului în încăperile secției de reanimare se efectuează timp de 30 minute de trei ori pe zi.

- Dezinfecția aerului în sălile de manipulări, proceduri și pansament se efectuează timp de 30 minute după curățenia umedă (de 3 ori pe zi și la necesitate).

- Dezinfecția aerului în saloanele, cabinetele diagnostice și cabinetele de consultație a medicilor se efectuează timp de 30 minute după curățenia umedă.

- în caz de necesitate de a activa timp îndelungat în încăperile unde funcționează lămpile bactericide de tip deschis, necesită să fie utilizat echipament individual de protecție:

ochelari cu filtre, mască pentru față, mănuși.

- toate încăperile, unde se folosesc instalațiile bactericide, trebuie să dispună de sisteme de ventilare mecanică de tip flux-reflux, sau de sisteme de ventilare naturală prin intermediul ferestrelor.

- în momentul aplicării lămpii ferestrele trebuie închise și nu trebuie să existe persoane în încăpere;

- dezinfecția se menține atât cât nu există surse de recontaminare (pacienți cu boli respiratorii, personal, ferestre deschise etc.);

- dezinfectarea ultravioletă bactericidă se efectuează numai de către asistentele medicale

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

responsabile pentru activități în încăperile respective.

- demontarea și/sau schimbarea lămpii bactericide are loc de către bioinginerii din cadrul instituției la cerere și doar în cazul finalizării numărului de ore consumate (numărul de ore este specificat în fișa tehnică de uz a lămpii bactericide eliberată de către producător) sau în cazuri excepționale.

Particularități:

- tubul bactericid al lămpii trebuie păstrat în perfectă stare de curățenie (după deconectare de la rețea se șterge cu o bucată de material textil îmbibat în alcool de 70%);
- în cazul în care pe tub există materie organică aceasta interferă cu lungimea de undă a lămpii modificându-se efectul germicid al acesteia (lungimea de undă cu efect germicid maxim este de 253,7nm);
- în momentul aplicării lămpii ferestrele trebuie închise și nu trebuie să existe persoane în încăpere;
- dezinfecția se menține atît cît nu există surse de recontaminare (pacienți cu boli respiratorii, personal, ferestre deschise etc.);
- cînd s-a ajuns la nr. de ore de funcționare ~9000h/tub este necesar de anunțat bioinginerul medical, care va schimba tubul, această schimbare consemnîndu-se (data cînd a fost schimbat tubul) în registrul de evidență a lămpii UV;
- registrul de evidență este obligatorie a lămpii UV, este un document oficial în care se consemnează detalii privind utilizarea lămpii bactericide, inclusiv: data și ora, durata expunerii, locația (salon, sală de tratament, persoana responsabilă de operare, observații privind funcționarea lămpii sau incidente).
- obligator se completează registrul pentru fiecare lampă UV aparte, pentru a calcula orele de funcționare a acesteia și pentru a documenta procesul de dezinfecție.
- Registrul obligator se numerează paginile, se coase și se pune ștampila instituției și semnătura Directorului.

8.4.3 Valorificarea rezultatelor activității

- îmbunătățirea controlului sanitaro-igienic și antiepidemic;
- asigurarea controlului infecțiilor nosocomiale și de securitate a pacientului și a personalului;
- dare de seamă periodică și anuală;

8.4.4 Controlul calității dezinfecției ultraviolete bactericide

Controlul calității dezinfecției ultraviolete bactericide se petrece lunar (control bacteriologic de pe instrumnte, suprafețe, aerului din încăperi) de către laboratorul microbiologic al instituției.

8.4.5. Măsuri de protecție

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ	PROCEDURA nr. 03/08 IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
Titlul: PO privind utilizarea instalațiilor bactericide ultraviolete	Secția Managementul Calității serviciilor medicale

- Exploatarea instalațiilor bactericide, trebuie să fie efectuate în conformitate cu indicațiile prescrise în instrucțiunile de exploatare.
- Exploatarea instalațiilor bactericide se va efectua doar de personalul care a fost instruit în acest sens.
- Este interzis de a intra în încăperea unde funcționează instalația ultravioletă bactericidă de tip deschis.
- în caz de necesitate de a activa în încăperile unde funcționează lămpile bactericide de tip deschis personalul trebuie să folosească echipament individual de protecție: ochelari cu filtre, măști faciale, mănuși.
- echipamentul de protecție trebuie să fie permanent la dispoziție în cazul situațiilor excepționale.
- în cazul depistării unui miros puternic de ozon, trebuie imediat deconectată instalația de la sursă, să asigure evaluarea persoanelor din încăperea și aerisirea până la dispariția mirosului,
- lămpile bactericide, cu termenul de valabilitate expirat sau care s-au detectat, trebuie să fie depozitate în recipiente metalice etichetate într-o încăperea separată special amenajată.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității.

9.1 Responsabil de proces=asistenta medicală de proceduri sau asistenta medicală de gardă.

9.2 Echipa de proces:

- Directorul aprobă resursele materiale și financiare pentru procurarea lămpilor bactericide.
- Șeful secției verifică periodic starea de igienă a echipamentelor și instruește personalul asupra metodei dezinfecție prin utilizare a lămpii UV. Monitorizează periodic efectivitatea curățeniei și dezinfecției.
- Asistenta superioară pune la dispoziție dezinfectantele necesare și verifică starea echipamentelor și instruește personalul pentru efectuarea corectă a dezinfecției.
- Sora economă pune la dispoziție toate materialele de menaj necesare.
- Asistenta de proceduri sau asistenta medicală sub îndrumarea asistentei superioare efectuează dezinfecția prin utilizarea lămpii bactericide UV conform procedurii date, ducând evidența numărului de ore de lucru.
- Bioinginerul medical asigură buna funcționare a lămpilor bactericide UV.
- Epidemiologul instruește periodic personalul asupra modului de utilizare a lămpilor bactericide, raportează despre rezultate investigațiilor vicedirectorului medical.

Laborantul prelevează lavajele periodice și la necesitate, efectuează investigațiile microbiologice a lavajelor și raportează despre rezultate epidemiologului.